	PROCEDURA AKREDYTACYJNA KZ 1.5 - 2	Strona 1 z 2
	PROCEDURA DEZYNFEKЦИИ WSTĘPNEJ NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO WIELOKROTNEGO UŻYCIA	Wydanie 2 Nr zmiany 0

	Stanowisko / Imię i nazwisko	Data	Podpis
OPRACOWAŁ:	Kierownik Działu Higieny i Epidemiologii mgr Halina Zejfer	07.04.2021r.	
SPRAWDZIŁ:	Dział Higieny i Epidemiologii mgr Jolanta Karczewska	09.04.2021r.	
ZATWIERDZIŁ:	Dyrektor mgr Krystyna Zaleska	12.04.2021r.	
Niniejszy dokument jest własnością Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu. Rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego dokumentu lub jego fragmentu osobom spoza Specjalistycznego Szpitala Miejskiego wymaga pisemnej zgody Dyrektora.			

1. Cel:

- 1.1. Zredukowanie liczby drobnoustrojów do poziomu bezpiecznego dla pracowników centralnej sterylizacji.
- 1.2. Zabezpieczenie narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego przed zaschnięciem krwi i innego materiału biologicznego (na czas transportu do centralnej sterylizacji).
- 1.3. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów.

2. **Zakres:** komórki organizacyjne świadczące usługi medyczne

3. Zakres odpowiedzialności:

3.1. **Personel medyczny** - wykonuje czynności zgodnie z procedurą.

3.2. **Pielęgniarka Oddziałowa/Koordynująca, Kierownik** – sprawuje nadzór na właściwym stosowaniu procedury

4. **Skróty i definicje:** brak

5. Sposób postępowania:

5.1. Dezynfekcji wstępnej nie wymagają narzędzia chirurgiczne i sprzęt medyczny bez kontaktu z materiałem biologicznym oraz przekazywanych do sterylizacji w czasie nie przekraczającym 3 godziny od użycia (nie dotyczy narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego skażonego drobnoustrojami wytwarzającym spory).

5.1.1. narzędzia chirurgiczne lub sprzęt medyczny bezpośrednio po użyciu włożyć do sita umieszczonego w kuwecie transportowej, zamknąć pokrywę kuwety

5.2. Dezynfekcja wstępna:

5.2.1. Dezynfekcji wstępnej należy poddać narzędzia chirurgiczne i sprzęt medyczny:


- użyte do zabiegów septycznych lub na salach izolacji pacjentów
- użyte do zabiegów poza godzinami pracy sterylizacji
- przekazywane do sterylizacji przez pracownika danej komórki organizacyjnej
- skażone drobnoustrojami wytwarzającymi spory np. *Clostridium perfringens*, *Clostridioides difficile*)

5.2.2. bezpośrednio po użyciu sprzęt medyczny lub narzędzia chirurgiczne ułożyć na sicie umieszczonym w kuwecie transportowej

5.2.3. spryskać dokładnie wszystkie powierzchnie preparatem dezynfekcyjnym w postaci piany

5.2.4. zamknąć pokrywę kuwety

5.3. Do dezynfekcji sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych zanieczyszczonych materiałem biologicznym podczas zabiegów septycznych (pole operacyjne skażone drobnoustrojami wytwarzającymi spory) używać roztworów użytkowych preparatów dezynfekcyjnych zawartych w załączniku FKZ 1-4-1 Wykaz i przeznaczenie preparatów dezynfekcyjnych, antyseptycznych, myjąco -dezynfekujących, myjących stosowanych w szpitalu.

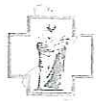

- 5.3.1. narzędzia i sprzęt należy wkładać powoli, ukosem i delikatnie nimi poruszać, co umożliwi usunięcie pęcherzyków powietrza z przestrzeni wewnętrznych,
- 5.3.2. narzędzia zawiasowe należy rozpiąć (z wyjątkiem opinaków), ruchome części rozkręcić lub rozmontować, zgodnie z instrukcją producenta narzędzi, aby ułatwić środkiem dezynfekcyjnym penetrację wszystkich powierzchni,
- 5.3.3. wypełnić preparatem wnętrza kanałów,
- 5.3.4. Przykryć wanienkę pokrywą
- 5.3.5. Umieścić na pokrywie następujące informacje:
- godzinę rozpoczęcia i zakończenia dezynfekcji
 - nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie dezynfekcji
- 5.4. Po wymaganym czasie dezynfekcji:**
- 5.4.1. wyjąć koszosito lub sito z narzędziami oraz sprzętem i umieścić w komorze zlewozmywaka,
- 5.4.2. wypłukać narzędzia i sprzęt z preparatu dezynfekcyjnego pod bieżącą letnią wodą (ustawić delikatny strumień wody, aby uniknąć rozpryskiwania),
- 5.4.3. włożyć koszosito z narzędziami lub sprzętem do kuwety transportowej,
- 5.4.4. kuwetę szczelnie zamknąć i przygotować do przekazania do centralnej sterylizacji.
- 5.5.W przypadku konieczności wymiany preparatu dezynfekcyjnego lub zakończenia dezynfekcji:**
- 5.5.1. wylać preparat z zachowaniem środków ostrożności,
- 5.5.2. całą powierzchnię wanienki dezynfekcyjnej i sita zdezynfekować, wypłukać i wytrzeć do sucha.
- 6. Obowiązujące zasady:**
- 6.1. Podczas wykonywania dezynfekcji należy używać rękawic, do mycia i płukania dodatkowo założyć fartuch ochronny.
- 6.2. Czas rozpoczęcia i zakończenia dezynfekcji (czas dezynfekcji liczony jest od włożenia ostatniego narzędzia /sprzętu).
- 6.3. Narzędzia chirurgiczne i sprzęt medyczny oraz koszosito muszą być całkowicie zanurzone w preparacie dezynfekcyjnym.
- 6.4. Z uwagi na niebezpieczeństwo korozji nie jest wskazane przetrzymywanie narzędzi i sprzętu medycznego w preparacie dezynfekcyjnym przez czas dłuższy niż zalecany.
- 7. Dokumenty związane:**
- 7.1. Organizacja realizacji usługi sterylizacji.
- 7.2. FKZ 1-4-1 Wykaz i przeznaczenie preparatów dezynfekcyjnych, antyseptycznych, myjąco - dezynfekujących, myjących stosowanych w szpitalu.
- 7.3. Procedura przygotowania roztworu użytkowego preparatu dezynfekcyjnego do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego wielokrotnego użycia KZ 1.5 – 1.
- 7.4. Procedura stosowania środków ochrony indywidualnej KZ 1.7 – 1.
- 7.5. Procedura higienicznego mycia i dezynfekcji rąk KZ 1.2-1.
- 7.6. Lejbtandt E., Tymoczko A., (red.), Higiena w placówkach opieki medycznej, Warszawa 2018.
- 8. Załączniki: brak**
- 9. Tabela zmian:**

Tabela zmian w dokumencie akredytacyjnym			
Numer zmiany	Data zmiany	Treść zmiany	Podpis